




# Anleitung Lollitest

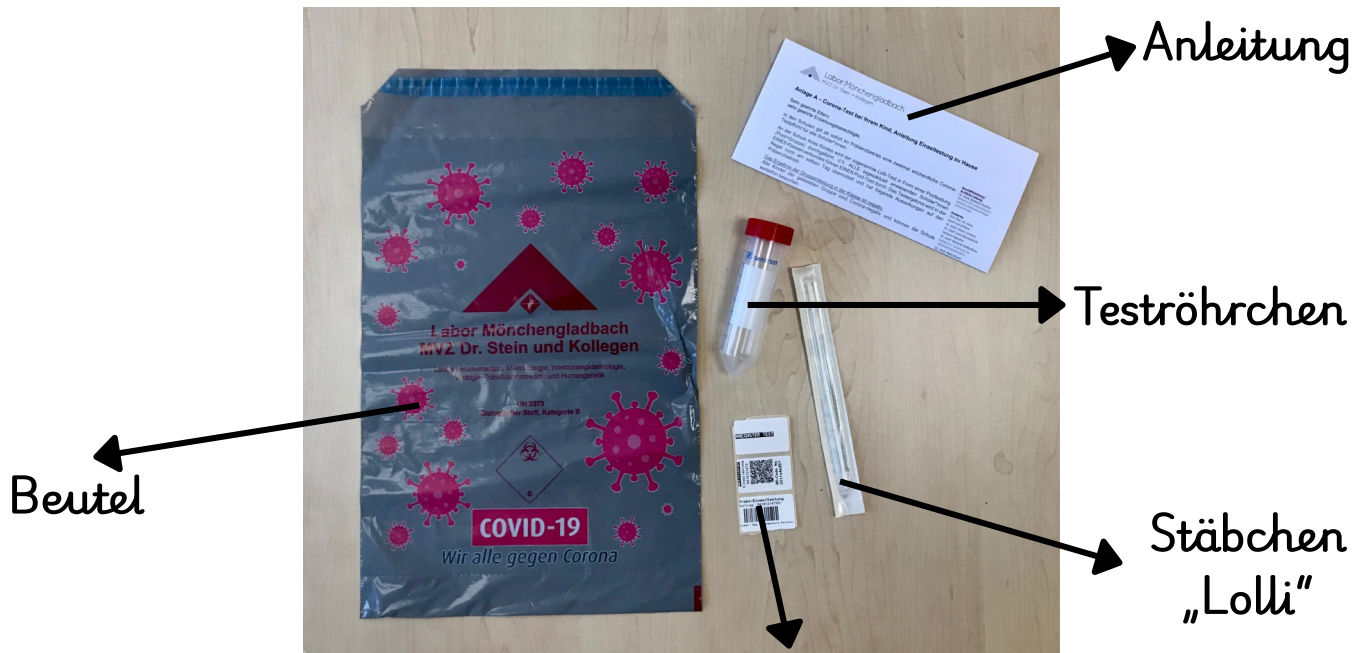

1

30 Sekunden lutschen

2

Stäbchen knicken und Oberteil ins Teströhrchen stecken

3

Probe-Einzeltestung  
Auftrag: 041012147301  
Städt. Gem. Grundschule Kastanie

Etikett Strichcode auf Teströhrchen kleben

4

Teströhrchen in Beutel und Beutel zukleben

5

Aktivieren Einzeltestung 0410121473 QR-Code No. 331fe4b957

Mit Fotoapp QR-Code scannen und Kind anmelden!  
**Bis 9 Uhr in die Schule bringen!**



# Talimatlar Lollitest



1

kamuşu 30 saniye emin

2

kamuşu ortadan bükün ve üst kısmını test tüpüne yerleştirin

3

barkod etiketini test tüpüne yapıştırın

4

Test tüpünü poşetin içine koyun ve poşeti kapatın

5

QR kodunu fotoğraf uygulamasıyla tarayın ve çocuğunuzu kaydedin!  
**Sabah 9'da okula gelin!**